

MEDISANCE CO. LTD.
КАТАЛОГ ФИЛЛЕРОВ



ФИЛЛЕРЫ ОТ КОМПАНИИ HYAFILIA

- Препараты HyaFilia являются филлерами 5-го поколения гибридной структуры. Они совместили лучшие качества как моно-, так и бифазных продуктов. Соответствие качества и безопасности препаратов международным и российским стандартам доказано проведенными клиническими испытаниями, и официально подтверждено соответствующими сертификатами.
- Бифазная структура геля представляет собой сочетание биотехнологичной стабилизированной гиалуроновой кислоты 85% и нестабилизированной фракции 15%. Новейшая технология и состав обеспечивают филлеру высокую пластичность при введении. Имплантация филлера дает быстрый и продолжительный эффект не только за счет волюмизации, но и за счет улучшения качества кожи. Длительность эстетического эффекта составляет 6 — 14 месяцев.
- Препараты HyaFilia биodeградируют до воды и углекислого газа (H_2O и CO_2) и полностью выводятся из организма. Это обеспечивает безопасность для пациента при проведении процедуры повторной коррекции, а также дает возможность специалисту добиться лучшего результата.
- При естественной биodeградации не возникает фрагментации и миграции препарата в тканях, что обеспечивается его высокой степенью тиксотропности.
- Препарат устойчив к действию свободных радикалов, что защищает его от преждевременного распада. Гель обладает памятью заданной формы, которая сохраняется после его введения. Это выгодно отличает HyaFilia от монофазных препаратов. Такое свойство является га-рантом прекрасного эффекта коррекции и внешнего вида пациента.

HYAFILIA PETIT



Hyafilia Petit — используется для коррекции мелких и поверхностных морщин.

Концентрация: 20 мг/мл

Объемная способность: +++

Показания:

- коррекция носослезной борозды
- тонкие морщины-линии
- "гусиные лапки"
- периоральные линии
- линейные морщины в области межбровья
- коррекция контуров губ

Гарантированная продолжительность действия: 9 месяцев.

Уровень инъекции: глубокий слой дермы.

Состав Ретикулированная гиалуроновая кислота (20 мг/мл)
Средний размер частиц 200 мкм
Показания Для коррекции мелких и поверхностных морщин
Глубина введения Поверхностные слои кожи
Форма выпуска (комплект игл) Hyafilia Petit 1.0: 1 ml (27G, 29G)
Степень модификации 1,90%
Доля не связанной ГК 15%
Молекулярный вес ГК 3 МДа
Модуль упругости G' 355 Па
Усилие введения 8 ньютон
Эндотоксины (EU/мл) < 0.25
Рекомендуемая канюля 27Gx40 мм
Техники введения Линейно-ретроградная, Мультипунктурная
Условия хранения Беречь от прямых солнечных лучей.
Срок хранения 36 месяцев

Шприц изготовлен из сополимера циклоолефина, благодаря чему устраняется возможность его повреждения.

Замок Луер-Лок предотвращает срыв иглы во время инъекции.

Поршень может вращаться на 360°. Во время инъекции вращающийся поршень не отсоединится от шприца.

Контейнер для шприца используется в качестве стерильного лотка при манипуляциях.

Тонкостенные иглы обеспечивают плавное введение даже самых плотных препаратов при минимальном усилии.

HYAFILIA CLASSIC



Hyafilia Classic- используется для коррекции морщин средней выраженности, для увеличения объема губ.
Концентрация: 20 мг/мл

Объемная способность: ++++

Показания:

заполнение морщин средней глубины

коррекция носогубных складок

"линии марионеток"

увеличение объема губ

перiorальные морщины

коррекция кистей рук

Гарантированная продолжительность действия: 9 месяцев.

Уровень инъекции: субдермально.

Состав Ретикулированная гиалуроновая кислота (20 мг/мл)

Средний размер частиц 500 мкм

Показания Для коррекции морщин средней выраженности, пластика губ

Глубина введения Средние слои кожи

Форма выпуска (комплект игл) Hyafilia Classic 1.0: 1 ml (27G, 29G)

Степень модификации 1,90%

Доля не связанной ГК 15%

Молекулярный вес ГК 3 МДа

Модуль упругости G' 375 Па

Усилие введения 8 ньютон

Эндотоксины (EU/мл) < 0.25

Рекомендуемая канюля 25Gx40-70 мм 27Gx40-70 мм

Техники введения Линейно-ретроградная, Веерная, Болюсная

Условия хранения Беречь от прямых солнечных лучей t 1-30c

Срок хранения 36 месяцев

Шприц изготовлен из сополимера циклоолефина, благодаря чему устраняется возможность его повреждения.

Замок Луер-Лок предотвращает срыв иглы во время инъекции.

HYAFILIA GRAND



Hyafilia Grand — самый плотный препарат из серии для увеличения объема скул, подбородка, щек.

Концентрация: 20 мг/мл

Объемная способность: +++++

Показания:

объемное ремоделирование

увеличение скул, подбородка, височной области

коррекция спинки носа

арантированная продолжительность действия: до 12 месяцев.

Уровень инъекции: супрапериостально, глубоко субдермально.

Состав Ретикулированная гиалуроновая кислота (20 мг/мл)

Средний размер частиц 1100 мкм

Показания Для коррекции глубоких морщин, пластика скул, подбородка, носа

Глубина введения Супрапериостально, Подкожно-жировая клетчатка

Форма выпуска (комплект игл) Hyafilia Grand 1.0: 1 ml (25G, 27G)

Степень модификации 2,20%

Доля не связанной ГК 15%

Молекулярный вес ГК 3 МДа

Модуль упругости G' 420 Па

Усилие введения 10 ньютон

Эндотоксины (ЕУ/мл) < 0.25

Рекомендуемая канюля 25Gx40-70 мм 27Gx40-70 мм

Техники введения Линейно-ретроградная, Веерная, Болюсная

Условия хранения Беречь от прямых солнечных лучей t 1-30c

Срок хранения 36 месяцев

Шприц изготовлен из сополимера циклоолефина, благодаря чему устраняется возможность его повреждения.

Замок Луер-Лок предотвращает срыв иглы во время инъекции.

Поршень может вращаться на 360°. Во время инъекции вращающийся поршень не отсоединится от шприца.

Контейнер для шприца используется в качестве стерильного лотка при

манипуляциях. Тонкостенные иглы обеспечивают плавное введение даже самых плотных

препаратов при минимальном усилии.

ФИЛЛЕРЫ ОТ КОМПАНИИ REVOLAX

Основа филлеров Револак – гиалуроновая кислота, сшитая по инновационной схеме. Благодаря этому больше не требуется дополнять компонентный состав свободными молекулами гиалуроната.

Предназначены биоревитализанты Револак для ликвидации возрастных деформаций покровов, а также для улучшения состояния кожи, нормализуя и стимулируя внутренние процессы.

Достигается эффект благодаря взаимодействию гиалуроновой кислоты неживотного происхождения с биологическими волокнами коллагена и эластина в клетках человека. В итоге, последние активируются и тем самым восполняют запасы, потерянные при естественном старении.

Линейка препаратов представлена несколькими филлерами, нацеленными на достижение разных результатов, что позволяет подобрать средство индивидуально.

- Revolax

Дермальный наполнитель на основе гиалуроновой кислоты в количестве 20 мг/мл, предназначенный для введения в средние слои кожи и субдермально.

REVOLAX FINE REVOLAX DEEP REVOLAX SUB-Q



REVOLAX FINE

- Биоревитализант средней плотности и высокой пластичности (гиалуроновая кислота в концентрации 20 мг/мл).
- Предназначен для решения проблем “гусиных лапок”, устранения рельефа в периорбитальной зоне, разглаживания межбровных заломов.
- Возможно введение препарата в области шеи. Воздействие филлера имеет эффект “стирания” эстетических недостатков дермы.

REVOLAX DEEP

- Дип – универсальный филлер с достаточно высокой плотностью гиалуроната (24 мг/мл), дополненного 0,3% лидокаином.
- Используется для выравнивания заметно выраженного рельефа кожи, а также для заполнения подкожного пространства с целью наращивания недостающего объема.

REVOLAX SUB-Q

Еще один филлер линейки Revolax с достаточно высокими показателями плотности (ГК 24 мг/мл), за счет чего становится возможным скульптурированные формы лица: увеличение объема щек и скуловой области, исправление подбородочной линии.

Преимущества

- Плюсов у корейского препарата достаточно, чтобы выделить его среди остальных средств для манипуляции.
- Чистота используемого сырья и, как следствие, самой сыворотки.
- Отсутствие дискомфорта во время проведения процедуры в связи с оптимальной консистенцией геля и вязкостью.
- Минимальный риск проявления отечности после инъекций за счет полного обезвоживания молекул гиалуроновой кислоты.
- Полная безопасность применения – препарат выпускается в стерильном шприце и является гипоаллергенным.
- 3D-модель гиалуроната, которая позволяет веществу как можно дольше сохраняться в дерме и не подвергаться процессу биологического распада.

ФИЛЛЕРЫ ОТ КОМПАНИИ DERMALAX



ФИЛЛЕРЫ DERMALAX DEEP PLUS И ФИЛЛЕРЫ DERMALAX DEEP *МОНОФАЗНЫЙ* ГЕЛЬ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

Отличаются между собой тем, что Dermalax DEEP не имеет в своём составе лидокаина.

Dermalax — линейка филлеров высочайшей степени очистки, обеспечивающие простоту введения и длительное сохранение эффекта, по сравнению с филлерами предыдущего поколения. Гиалуроновая кислота для производства филлера Dermalax DEEP Plus поставляется японским концерном SHISEIDO — одним из лидеров на рынке косметических и фармацевтических препаратов.

Dermalax DEEP PLUS (1 x 1,1 мл) — филлер на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, неживотного происхождения, прошедшей процесс высшей степени очистки, достигаемый за счёт длительного времени перекрестного сшивания при низкой температуре.

Константная сила выталкивания обеспечивает плавное введение препарата.

ФИЛЛЕРЫ DERMALAX DEEP PLUS И ФИЛЛЕРЫ DERMALAX DEEP ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

Филлеры Dermalax DEEP Plus (1 x 1,1 мл) — применяются для коррекции средневывраженных и глубоких морщин и складок на лице, увеличение объема бровей, височной зоны, щёк, подбородка, восстановление контура и объёма губ.

Филлеры Dermalax DEEP Plus (1 x 1,1 мл) вводится в средний или глубокий слой кожи.

Концентрация гиалуроновой кислоты

Dermalax DEEP 20 мг/мл. Не содержит лидокаина.

Dermalax DEEP Plus 24 мг/мл. Содержит 0,3 % лидокаина.

Стабилизация BDDE.

В упаковке 1 шприц.

Объём шприца 1,1 мл.

Вводится иглой 27G.

Температура хранения 2-25 градусов.

Dermalax DEEP Plus даёт натуральный и долговременный результат — от 6 до 12 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей организма клиента и его образа жизни.

Филлерам Dermalax свойственны следующие качества:

высокая эластичность

длительный эффект

повышенная безопасность

натуральный эффект

100% поперечное сшивание молекул ГК без свободных радикалов минимизирует припухлость на начальной стадии после инъекции.

Воспаление и аллергическая реакция сведены к минимуму за счёт строгого контроля эндотоксина, остатков БДДЕ и белка.

ФИЛЛЕРЫ ОТ КОМПАНИИ NEURAMIS



Neuramis - это дермальные филлеры на основе стабилизированной очищенной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения.

Neuramis Lidocaine - стерильный, монофазный, биологически совместимый гель. Каждая ампула Neuramis содержит 1мл геля в одноразовом стерильном шприце с иглой 30G 13мм.

В составе препарата содержится лидокаин в концентрации 0,3%

Показания к применению Neuramis Lidocaine

Заполнение мелких и средне-выраженных морщин

Увеличение губ

Исправление контуров лица

Увлажнение кожи

Neuramis Volume Lidocaine

Neuramis Volume Lidocaine - стерильный, монофазный, биологически совместимый гель. Каждая ампула Volume Lidocaine содержит 1мл геля в одноразовом стерильном шприце с иглой 27G. В составе препарата содержится лидокаин в концентрации 0,3%

Показания к применению Neuramis Volume Lidocaine

Заполнение морщин среднего и глубокого размера

Увеличение губ

Исправление контуров лица

Neuramis Deep Lidocaine - стерильный, монофазный, биологически совместимый гель. Каждая ампула Neuramis Deep содержит 1мл геля в одноразовом стерильном шприце с иглой 27G.

В составе препарата содержится лидокаин в концентрации 0,3%

Показания к применению Neuramis Deep Lidocaine

Заполнение морщин среднего и глубокого размера

Увеличение губ

Исправление контуров лица

Особенности препарата:

- Побочные эффекты сведены к минимуму, гиалуроновая кислота неживотного происхождения, наполнитель в комплекте.
- Повышает упругость кожи.
- Длительный эффект.
- Признан безопасным и одобрен международными органами по надзору за качеством препаратов.